


Per Maggiori informazioni può contattarci telefonicamente o via Whatsapp al +39 3519143099


Acquisizione dataset: eseguire tutte le foto e i video seguendo le istruzioni allegate e salvarle sul proprio telefono. Successivamente caricare i file sulla web app durante la procedura di definizione dell'ordine

Acquisizione foto

1. Foto arco piede destro: Scatta una foto laterale della parte interna del piede destro con piede sinistro sollevato da terra (utilizzare un appoggio se necessario). Fare attenzione a posizionare il piede sul bordo del foglio come illustrato nella foto esempio.

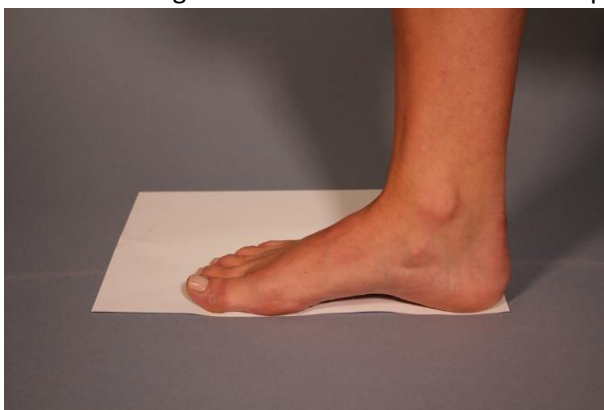

2. Foto arco piede sinistro: Scatta una foto laterale della parte interna del piede sinistro con piede sinistro sollevato da terra (utilizzare un appoggio se necessario). Fare attenzione a posizionare il piede sul bordo del foglio come illustrato nella foto esempio.

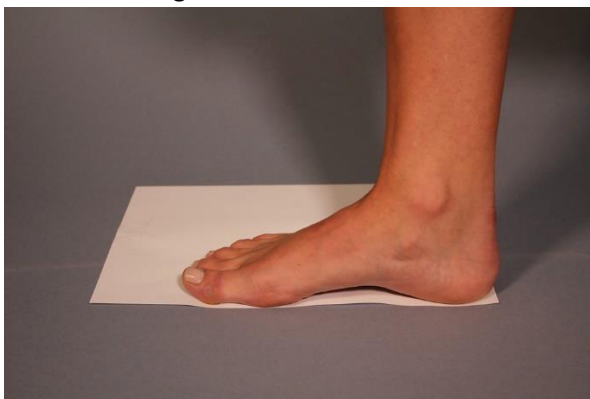

Per Maggiori informazioni può contattarci telefonicamente o via Whatsapp al +39 3519143099

3. Foto piede destro sotto carico: Scatta una foto del piede destro mentre spingi sulla punta come se stessi camminando. Guarda la foto esempio per chiarimenti.



4. Foto piede sinistro sotto carico: Scatta una foto del piede sinistro mentre spingi sulla punta come se stessi camminando. Guarda la foto esempio per chiarimenti.



5. Foto piedi paralleli (vista posteriore): Scatta una foto da dietro con i piedi leggermente aperti (larghezza delle anche). Guarda la foto esempio per chiarimenti.



Capitale Sociale 30.000€ - Sede 00118 via Monasterace 43 (Roma)

Tel. +39 3519143099- E-mail administration@medere.it

P.E.C. medere.srl@legalmail.it – Web www.medere.it

Codice Fiscale e Partita IVA I5004601009 - Codice Destinatario X2PH38J

Per Maggiori informazioni può contattarci telefonicamente o via Whatsapp al +39 3519143099

6. Foto talloni uniti e punte separate (vista anteriore): Scatta una foto frontale di entrambi i piedi con i talloni uniti e le punte separate a formare una V. Ricorda di posizionare uno dei piedi lungo il bordo di un foglio A4 come indicato nella foto esempio.



7. Foto soletta scarpa utilizzata: Scatta una foto dall'alto di una delle solette posizionata su di un foglio A4. Guarda la foto esempio per chiarimenti.



Acquisizione video

NB: esegui il video restando a circa 1 metro dal piede e muovendoti come nel video per circa 30 secondi.

Video Tutorial: https://drive.google.com/file/d/1DbNi1OFmZ-pdFJXoAj5ThexMTBVZXYep/view?usp=drive_link

1. Video piede destro
2. Video piede sinistro

Capitale Sociale 30.000€ - Sede 00118 via Monasterace 43 (Roma)

Tel. +39 3519143099- E-mail administration@medere.it

P.E.C. medere.srl@legalmail.it – Web www.medere.it

Codice Fiscale e Partita IVA I5004601009 - Codice Destinatario X2PH38J